



Livret d'utilisation



INJECTION SOUS-CUTANÉE

D-mine® Pen

INTRODUCTION


Cette brochure contient des instructions sur l'utilisation du **Stylo D-mine®** et ses consommables. Elle n'est pas destinée à remplacer le manuel d'utilisation du stylo.

Votre **Stylo D-mine®** peut délivrer des doses de 0,5 à 6,0 mg, par paliers de 0,5 mg (correspondant à 50 µl par palier). Il est conçu pour être utilisé uniquement avec les cartouches Dopaceptin® 3 ml (chlorhydrate d'apomorphine hémihydraté 10 mg/ml) d'EVER Neuro GmbH (veuillez vous référer à la notice de la spécialité pharmaceutique) et les aiguilles à stylo appropriées. Aiguilles de stylo compatibles :

- les aiguilles BD Micro-Fine Ultra™ de calibre 29 à 31 gauges (diamètre 0,25 - 0,33 mm) et de longueur 5 - 12,7 mm
- les aiguilles pour stylo d'autres fabricants peuvent être utilisées s'il est spécifié qu'elles sont compatibles avec le **Stylo D-mine®**.

Veuillez vous référer à la notice de la spécialité pharmaceutique Dopaceptin® 10 mg/ml, solution injectable en cartouche. Avant d'utiliser le **Stylo D-mine®**, lavez-vous les mains. Vous aurez besoin de compresses antiseptiques et d'une aiguille dans son emballage. Avec une compresse antiseptique, nettoyez la zone d'injection du médicament et autour du site d'injection. Le médicament doit être injecté par voie sous-cutanée dans l'abdomen ou à l'extérieur des cuisses comme indiqué par votre médecin ou infirmier. Changez de site d'injection à chaque nouvelle utilisation. N'injectez pas le médicament dans une zone cutanée douloureuse, rouge, infectée ou blessée. N'injectez jamais le produit directement dans une veine (injection intraveineuse), ni dans un muscle (injection intramusculaire).

DESCRIPTION DU STYLO D-MINE®

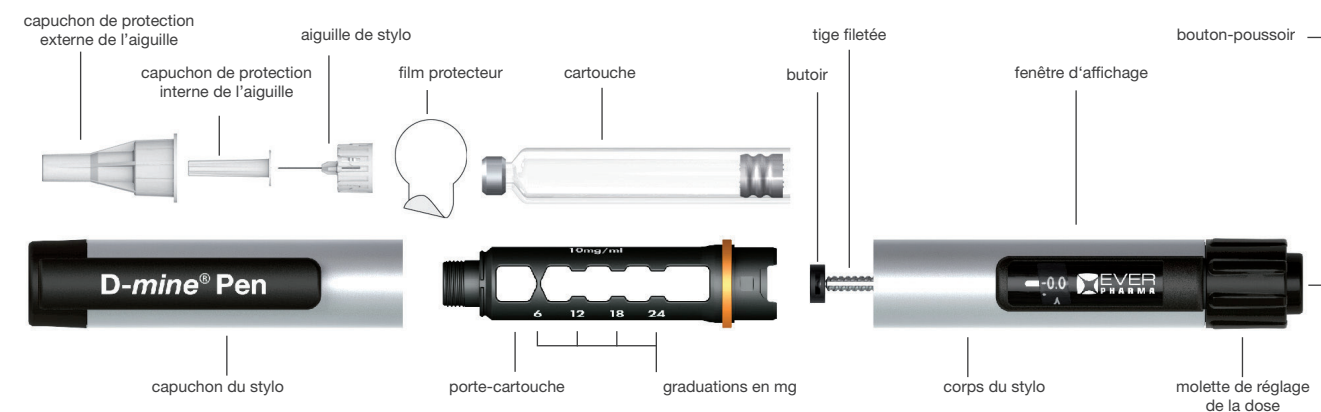


Veuillez vous reporter aux instructions d'utilisation de votre **Stylo D-mine®** pour des informations complètes. Si vous avez des questions concernant votre **Stylo D-mine®**, notre service d'assistance téléphonique local se fera un plaisir de vous aider à tout moment.

PRÉPARATION DU STYLO / MISE EN PLACE DE LA CARTOUCHE

Suivez les instructions pour l'utilisation de votre aiguille de stylo.


1. Retirez le film protecteur de l'aiguille.

Cliquez/vissez l'aiguille du stylo sur le porte-cartouche. Vérifiez que l'aiguille est correctement fixée.

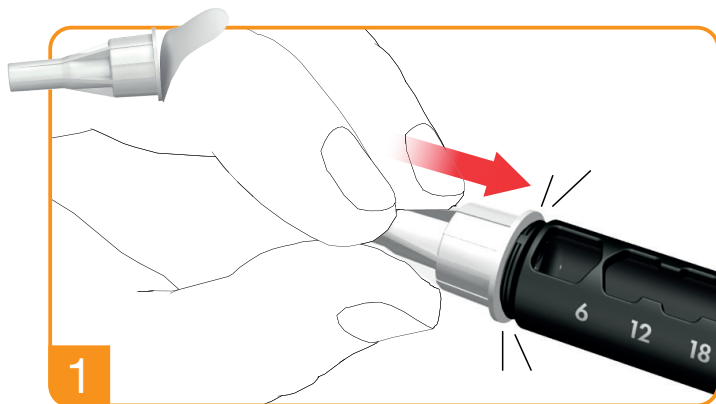

2. Retirez le capuchon de protection interne de l'aiguille.

Conservez le capuchon de protection externe de l'aiguille pour détacher et éliminer en toute sécurité l'aiguille après utilisation.

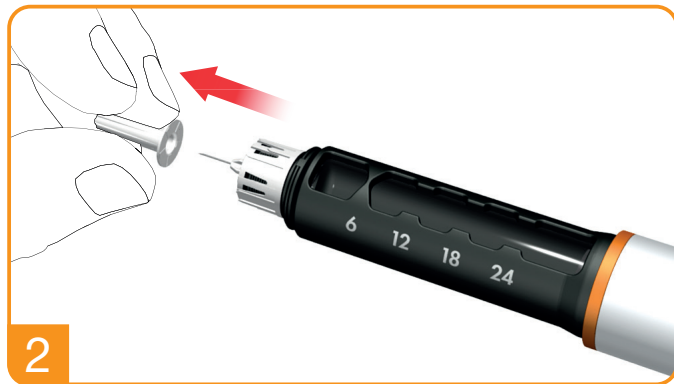


AMORÇAGE / CONTRÔLE DE FONCTIONNEMENT

Le contrôle de fonctionnement est destiné à s'assurer qu'il n'y ait plus d'air dans la cartouche et que l'aiguille ne soit pas bloquée. Il est recommandé d'amorcer le stylo avant chaque utilisation, avant de changer de cartouche et avant de fixer une aiguille.



Sélectionnez la dose requise en tournant la molette dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour corriger la dose, tournez la molette dans le sens inverse. Vérifiez la dose sélectionnée dans la fenêtre d'affichage en regardant le stylo horizontalement, sans l'incliner, de manière à pouvoir lire correctement les chiffres.

INJECTION

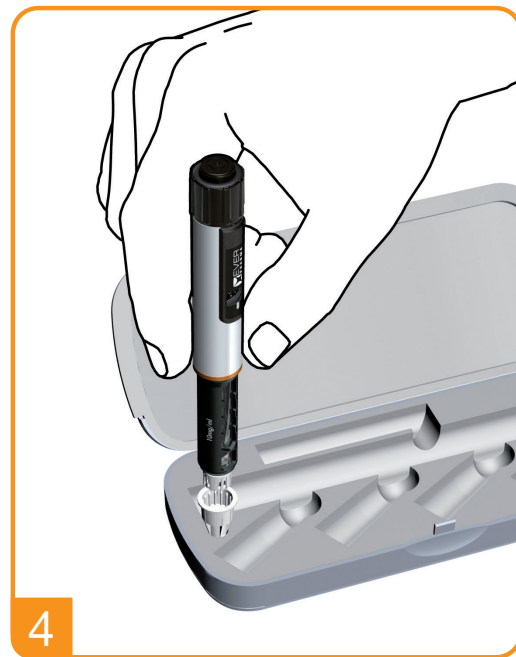


À noter : Vous pouvez interrompre l'injection en relâchant le bouton-poussoir. La quantité restante de médicament non délivrée peut être visualisée sur l'écran et peut être injectée en appuyant à nouveau sur le bouton-poussoir.

1. Utilisez la technique d'injection recommandée par votre médecin et/ou professionnel de santé. Appuyez à fond sur le bouton-poussoir pour l'injection. Maintenez le bouton-poussoir enfoncé pendant la décharge du médicament.

2. Une fois le médicament entièrement injecté, attendez 6 secondes puis retirez le stylo lentement. Pendant les 6 secondes, vous pouvez appuyer sur le bouton-poussoir ou le relâcher.

3. Vérifiez que l'affichage soit sur la position « 0.0 » pour l'administration complète de la dose.

4. Placez le capuchon externe de l'aiguille dans l'encoche gauche réservée à cet effet dans votre étui.

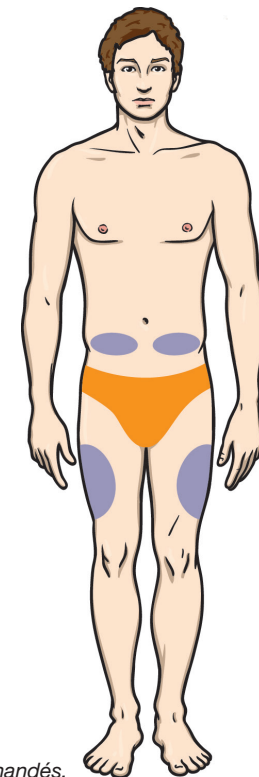

Sites d'injection recommandés.



Stylo D-mine® :

Dispositif Médical **CE** de classe IIa N° 64 114FR

Code GMDN 18069, code LPP 1132086

D-mine® Pen est fabriqué par EVER Neuro Pharma GmbH et distribué en France par EVER Pharma France SAS

EVER Pharma France SAS

27 rue Joannès Carret

69009 Lyon

info.fr@everpharma.com

www.everpharma.com

www.d-minecare.com

materiovigilance.fr@everpharma.com

0 805 691 272

Service & appel
gratuits