



GUIDE DÉTAILLÉ

**D-mine® Pump**

**COQUE ET ÉTUI DE PROTECTION**



## Coque et étui de protection Pompe D-mine®

La coque et l'étui de protection de la Pompe D-mine® sont conçus pour protéger la Pompe D-mine®, dispositif médical utilisé pour la perfusion continue dans la prise en charge de la maladie de Parkinson. Ces accessoires sont destinés à protéger la pompe des dommages potentiels causés par des incidents couramment rencontrés dans les environnements de soins aux patients et à domicile. La coque et l'étui de protection améliorent la durabilité de la pompe D-mine® réduisant le risque d'endommagement du dispositif. Cela permet non seulement d'assurer le fonctionnement continu de la pompe à perfusion, mais aussi de minimiser les interruptions de traitement.



**i** Le coque de protection de la pompe D-mine® est conçue pour être adaptée sur la pompe D-mine®. **Une fois mise en place, il n'est pas nécessaire de retirer la coque pendant l'utilisation classique de la pompe.** Les rabats amovibles de la coque de protection permettent d'insérer et de retirer le réservoir et de fixer la pompe à la station d'accueil sans retirer la coque.



**i** L'étui de protection de la pompe D-mine® permet de transporter facilement la pompe à la ceinture ou autour du haut du corps.

## Instructions d'utilisation de la coque pour Pompe D-mine®



Déballiez la coque de protection pour pompe D-mine®



Prenez votre pompe D-mine®, sans réservoir ni batterie, et glissez la coque de la pompe D-mine® par le bas.



Insérez la batterie de la pompe D-mine®



Insérez le réservoir de la pompe D-mine® Assurez-vous d'ouvrir complètement le rabat supérieur avant d'insérer le réservoir.



Fixez la pompe munie de l'adaptateur au flacon. Assurez-vous d'ouvrir complètement le rabat supérieur avant de fixer l'adaptateur au flacon.



Procédez au remplissage en plaçant la pompe D-mine® dans la station d'accueil. Veillez à ouvrir complètement le rabat inférieur avant d'insérer la pompe dans la station d'accueil.



Connectez le set de perfusion, préparez-le et amorcez-le.



Vérifiez que la pompe D-mine® est prête et commencez l'administration du médicament.

# Instructions d'utilisation de l'étui pour Pompe D-mine®



Placez la pompe D-mine® avec sa coque de protection dans l'étui de protection



Fixez les crochets de la sangle de transport à l'étui de protection de la Pompe D-mine®



La pompe D-mine® est prête !



Pour retirer facilement la pompe D-mine® de son étui de protection, il suffit d'ouvrir les boutons-pression situés sur le dessus de l'étui et d'appuyer sur la sangle située en dessous.

## D-mine® Pump

### COQUE ET ÉTUI DE PROTECTION

Une pompe protégée, une activité préservée.



EVER Pharma France  
84 quai Joseph Gillet 69004 Lyon  
Tél. 09 72 64 31 00  
Mail. [marches.fr@everpharma.com](mailto:marches.fr@everpharma.com)

[www.d-minecare.com/fra](http://www.d-minecare.com/fra)