


Guida rapida all'uso della pompa D-mine®

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI PER LA TERAPIA CON LA POMPA D-mine®

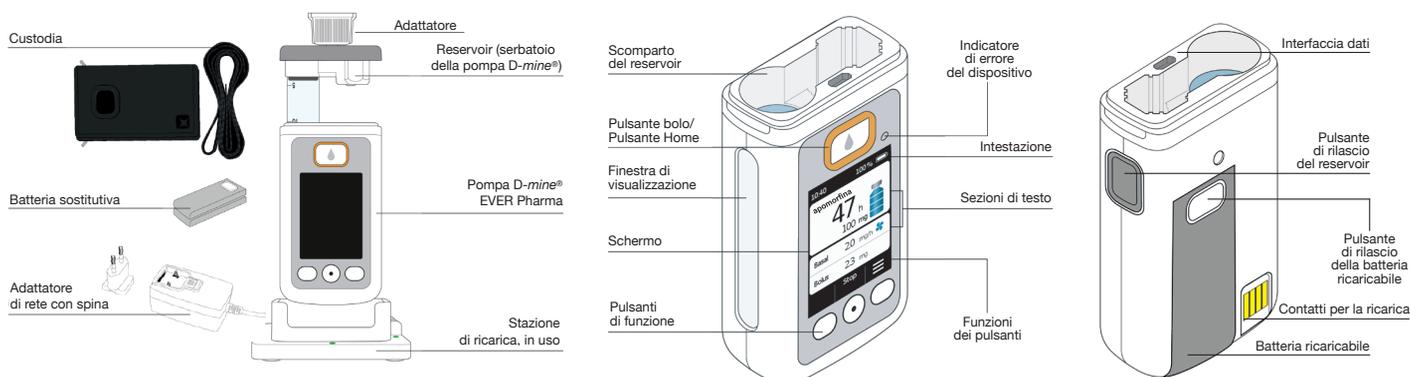

MATERIALI NECESSARI PER CONFIGURARE LA POMPA D-mine®

1. Assicurarsi di avere a disposizione i seguenti materiali:

- Pompa D-mine®
- Stazione di ricarica della Pompa D-mine®
- Flaconcino di farmaco da 20 ml
- Set di infusione
- Reservoir (serbatoio della Pompa D-mine®)
- Soluzione disinfettante per la cute e le superfici

2. Assicurarsi di avere una superficie di lavoro pulita.

3. Lavare e disinfettare accuratamente le mani prima di preparare l'infusione.

4. Cambiare la batteria ogni giorno prima di preparare l'infusione.



Smaltire gli oggetti taglienti (come gli aghi usati) secondo i requisiti locali (di solito in un contenitore per oggetti taglienti o equivalente)



1. Estrarre il reservoir dalla confezione.



2. Inserire il reservoir nella pompa facendolo scattare in posizione.



3. Premere "Nuovo reservoir", poi confermare "L'auto-test è stato completato".



4. Togliere il tappo arancione dal flaconcino e inserire il flaconcino nella stazione di ricarica.



5. Capovolgere la pompa con il reservoir e l'adattatore serrato e fare in modo che scatti verticalmente in posizione sul flaconcino nella stazione di ricarica.



6. Ruotare la pompa in posizione verticale con il flaconcino attaccato e inserirla nella stazione di ricarica. Controllare il posizionamento dell'adattatore ruotandolo in senso orario. Seguire le istruzioni sullo schermo per iniziare il processo di riempimento. Durante il processo di riempimento, la pompa deve rimanere in posizione verticale.




7. Afferrare il flaconcino con l'adattatore e rimuoverli entrambi dal reservoir ruotandoli in senso antiorario. Smaltire questi componenti con i rifiuti domestici secondo la Sezione 9.6 delle Istruzioni per l'uso.



8. Controllare che il raccordo filettato sul reservoir sia ancora pulito. Estrarre un set di infusione compatibile dalla confezione e collegarlo al reservoir della pompa. Serrare a mano la connessione filettata in modo sicuro.

PRIMING (SFIATO DEL SET DI INFUSIONE) E INIZIO DELL'INFUSIONE

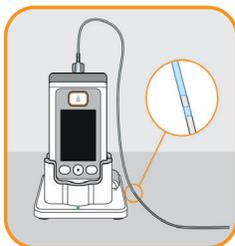


9. Posizionare la pompa in posizione verticale nella stazione di ricarica e confermare




10. Il display della pompa mostrerà il seguente messaggio: "Preparazione pompa in corso" attendere che si concluda la preparazione. La pompa deve rimanere in posizione verticale durante la preparazione.

11. Verrà mostrata l'opzione Sfiato del set di infusione - selezionare "Sì" o "No".

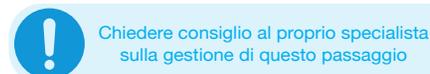

Chiedere consiglio al proprio specialista sulla gestione di questo passaggio


Si possono usare i seguenti punti di iniezione.

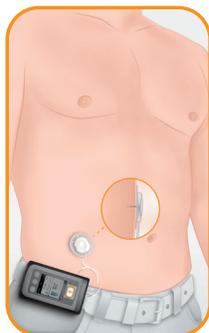

12. Applicare il set di infusione come consigliato dal proprio specialista e confermare il passaggio sulla pompa.



13. Per iniziare l'infusione, premere il pulsante "Inizio" per 3 secondi - le informazioni sulla velocità basale e sul bolo verranno visualizzate sul display. Il simbolo dell'elica rotante indica che la pompa è in funzione.

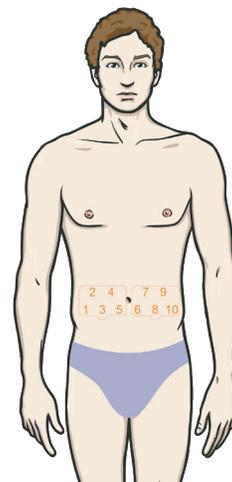

14. Assicurarsi di ruotare i punti di iniezione per ogni iniezione. Può essere utile massaggiare la cute per ridurre eventuali irritazioni.

INTERROMPERE LA SOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO

Se il farmaco rimanente sarà utilizzato il giorno seguente, lasciare il reservoir della pompa intatto e chiuderlo in modo sterile con un tappo adeguato durante la notte. Rimuovere il set di infusione usato e sostituirlo quando si è pronti a riprendere l'infusione.

Fare riferimento al punto 8 e collegare un nuovo set di infusione al reservoir della Pompa D-mine®. Quando il reservoir sarà vuoto, continuare con i seguenti passaggi:




1. Interrompere l'infusione premendo "Stop" sulla pompa.



2. Rimuovere il set di infusione dal sito di iniezione e dalla pompa. Smaltire il set di infusione in modo sicuro.



3. Rimuovere il reservoir usato dalla pompa premendo fermamente il pulsante grigio di rilascio sul fianco della pompa.

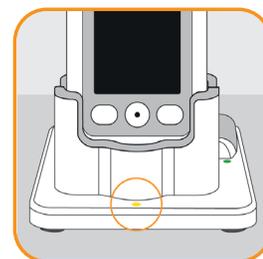

4. Smaltire il reservoir usato in un contenitore per oggetti taglienti e riporre la pompa nella stazione di ricarica.

Venite a visitarci su: www.d-minecare.com/it

D-mine® Care

La Pompa D-mine® è un dispositivo medico per la somministrazione sottocutanea sicura e affidabile del farmaco apomorfina a una concentrazione di 5 mg/ml per il trattamento della malattia di Parkinson.